


# ကိုဗစ်(တ်) ၁၉ ရောဂါ စမ်းသပ်နည်း

QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test Kit ၏ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော ကိုဗစ်(တ်)ရောဂါဖိုးရှိမရှိစမ်းသပ်နည်း။ အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင် အတွက် အတွင်းရှိ ညွှန်ကြားစာနှင့် လူနာ အချက် အလက်စာ များမှာလေ့လာပါ။ QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test Kit FDA ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အရေးပေါ် အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။



ရောဂါစမ်းသပ်နည်းဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်အတွက်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ

[quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2)

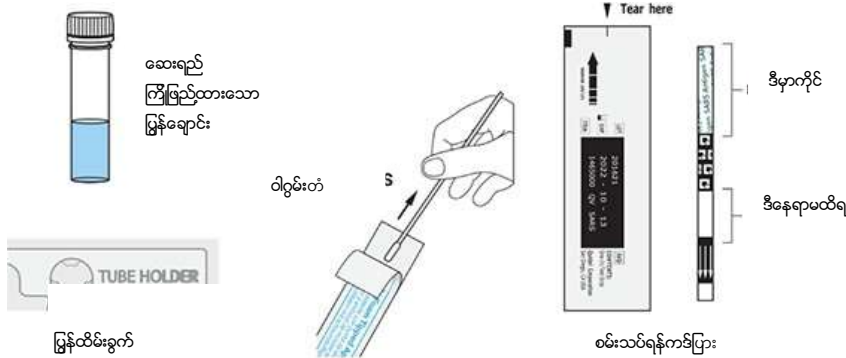


← စမ်းသပ်ကိရိယာအထုပ်ထဲဘာပါသလဲ

ကြိုဖြည့်ထားသောဖြန့်ချောင်း  
ဖြန့်ချောင်းထိမ်းခွက်  
သိပ္ပံမိတ် (နာမေ့ရန်အတွက်)  
စမ်းသပ်ရန်ကိရိယာ  
ညွှန်ကြားစာရွက်  
လူနာအချက်အလက်များ

## လိုအပ်သောအရာ

နာရီ သို့မဟုတ်အချိန်တိုင်းကိရိယာ(အထုပ်ထဲမပါ)  
အချိန်တိကျခြင်းသည်စမ်းသပ်မှု အတွက်  
အင်မတန်အရေးကြီးသည်

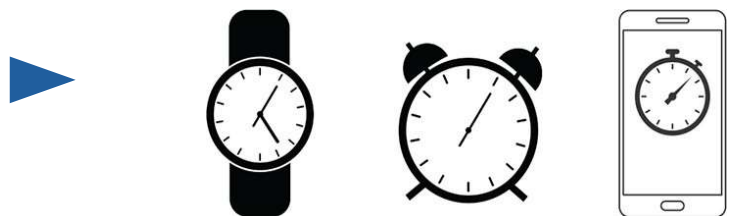

## စတင်စမ်းသပ်ရန်


လက်ဆေးပြီး နောက် စမ်းသပ်ကိရိယာကို ညီညာ ပြားချပ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်လိုက်ပါ။ အခန်းတွင်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်း ရှိရမည်။

အကယ်၍တစ်ခြားသူကို စမ်းသပ်ပေးလျှင် ပါးစပ်ဖုံးတပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ စမ်းသပ်ကိရိယာအထုပ်ကို ဖွင့်ပြီး ဖော်ပြပါပစ္စည်းအားလုံး ပါ မပါ စမ်းဆစ်ပါ။ နာရီ စချိန်ပြီး နောက်စာမျက်နှာမှာ

ညွှန်ပြထားသောအတိုင်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သွားပါ။

# စမ်းသပ်နည်း


1 မြွန်အဖုံးဖွင့် ပြီး မြွန်ထိမ်းခွက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပါ။

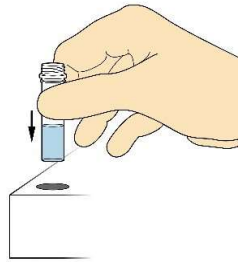

ဝါဂွမ်းတံထိပ်ကိုမထိရ။




2 အထုပ်ကိုခွာပြီးဂွမ်းတံကိုထုပ်ပါ။  
ဂွမ်းတံထိပ်ကိုမထိရ။


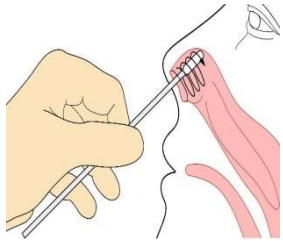


3 ဂွမ်းတံကိုနာခေါင်းထဲသို့ လက်မဝက် သို့မဟုတ် တစ်လက်မ သုံးပုံတစ်ပုံအထိ ထိုးထည့်ပြီး ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် နာခေါင်း နံရံကို ဖိပြီး မွှေပေးပါ။ ထိုဂွမ်းတံ နှင့် အခြားနာခေါင်းပေါက်ကို အလားတူလုပ်ပေးပါ။ ကြာမြင့်ချိန် ၁၅ မိနစ်ဖြစ်ပါသည်။

4 နာခေါင်းမှရသောနမူနာကို စမ်းသပ်မြွန် ထဲသို့ချက်ချင်း အောက်ခြေရောက်သည် အထိ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ၃ ကြိမ် သို့မဟုတ် ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင်မွှေပေးပါ။

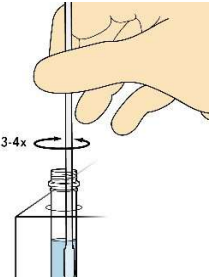

5 ဝါဂွမ်းတံကိုမြွန်ထဲ အနည်းဆုံးတစ်မနစ်စိမ်ထားပါ။ (နာရီ သို့ မဟုတ် အချိန်တိုင်းကိရိယာသုံးပါ) အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်း မပြည့် သို့မဟုတ်ကျော်လွန်လျှင်မှားရှင်း သော အဖြေ ရရှိနိုင်ပါသည်။

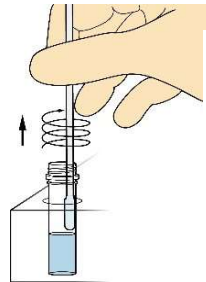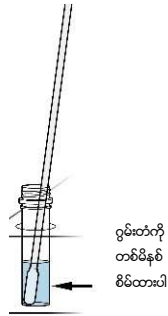


6 တစ်မိနစ်နောက်ပိုင်း ဂွမ်းတံကို စမ်းသပ် မြွန်မှ ထုတ်လိုက်ပါ။ မထုတ်ခင် စမ်းသပ်တံကို မြွန်၏ နံရံနှင့် ဖိတိုက်ပြီး အရည် ခမ်း နိုင်သလောက် ဖိတိုက်ညှစ်ထုတ်ပါ။ ဝါဂွမ်းတံကိုလွှတ်ပစ်ပါ။



7 စမ်းသပ်ကဒ်ပြားအခွံကို ခွာ ပြီး ကဒ်ပြား၏ များပါသောအပိုင်း ကို စမ်းသပ်မြွန် ထဲသို့ထိုးထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ် စိမ်ထားပါ။ နာရီကြည့်ပါ။ (နာရီ သို့ မဟုတ် အချိန်တိုင်းကိရိယာသုံးပါ)

မြွန်ထဲစမ်းသပ်ကဒ်ပြားကိုအနည်းဆုံး ဆယ်မိနစ် စိမ်ထားပါ

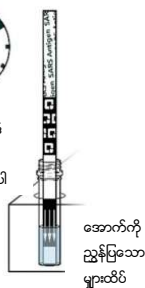


8 ဆယ်မိနစ်နောက် စမ်းသပ်ကဒ်ပြားကို မြွန်မှ ထုတ် ပြီး အလင်းရောင်ရှိသော ပြားချပ်သည် မျက်နှာပြင်ပေါ် တင် ပြီး ချက်ချင်း ကြည့် ပါ။ ၅ မိနစ်ထက်ကျော်လျှင် မှားယွင်းသောရလဒ် ရနိုင်ပါသည်။



## စမ်းသပ်မှုရလဒ်အဖြေဖတ်နည်း

ရောဂါဦး ရှိမရှိ သို့မဟုတ် မှားယွင်းသောစမ်းသပ်မှု

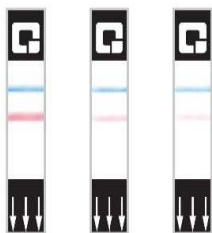

အပြာ နှင့် ပန်းရောင် ဖျဉ်း = ရောဂါဦးရှိနိုင်  
အပြာနှင့် ပန်းရောင် ပြုလျှင် ကိုဗစ်ဦး ရှိနိုင် သည်။ သီးသန့် ခွဲနေပါ။ အနေ အထိုင်မသက် မသာ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မှု ရှိလျှင်မိမိကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူနှင့် ဆက် သွယ်ပါ။



အပြာရောင် ဖျဉ်း=ရောဂါဦးမရှိ  
အပြာရောင်တွေ့လျှင် ရောဂါဦးမရှိ နိုင် ။ သို့ သော် အနေ အထိုင်မသက် မသာ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မှု ရှိ လျှင်မိမိကျန်းမာ ရေး စောင့် ရှောက်သူ နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။



ပန်းရောင်ဖျဉ်း = မှားယွင်းသောစမ်းသပ်မှု  
ပန်းရောင် သို့မဟုတ်လုံဝဖျဉ်းကြောင်း မတွေ့ လျှင် မှားယွင်းသော စမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခါ မြွန် လုပ်ပါ။ ကြိုတင်ထားသော မြွန်ချောင်း/ ဝါဂွမ်းတံ/စမ်းသပ်ကဒ်ပြား အသစ်သုံးပါ။ စမ်း သပ်မှု ရလဒ် နှစ်ကြိမ် မှားယွင်း လျှင် 1-833-784-2588 နံပါတ် ကို ခေါ်ပါ။